

+ WELKOM BIJ PITA MEDICAL



VEILIG TIJDENS DE
ZWANGERSCHAP

VERZACHTING
BIJ INFECTIE

STOPT HET
BLOEDEN

REDUCEERT OF STOPT
DE ANUS JEUK

BIEDT DIRECT
VERLICHTING BIJ PIJN

HEMORCOOL®

klinisch bewezen werkend medisch hulpmiddel bij aambeiklachten

Effectieve behandeling van aambeiklachten

Pita Medical BV, ontstaan uit ideologische grondslag, inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met een toegewijd team van (o.a. medische) professionals.

Ons streven is en was: voor iedereen met aambeiklachten, direct hulp te bieden, dit tegen een betaalbare prijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk om het - altijd nog bestaande - aambei-taboe te doorbreken. Het onderwerp aambeien is nog steeds moeilijk bespreekbaar, terwijl er toch zoveel mensen klachten hebben. Zowel mannen als vrouwen kunnen last hebben van aambeien. Hopelijk kunnen wij hierin bijdragen om de schaamte hierover wat wegnemen. Je zult er namelijk maar last van hebben.

Ons product is volledig veilig en kent geen bijwerkingen en mag gewoon tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Pita Medical heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan, continue zijn wij op zoek hoe we ons product(en) kunnen verbeteren. Wij volgen een strict hygiëne-, kwaliteits- en veiligheidsprotocol. Rechtstreeks na de controle komt de Hemorcool® in een volledig hygienisch verantwoorde en duurzame verpakking. De Hemorcool® is gebruiksvriendelijk en pijnloos in gebruik. De Hemorcool® is "a single user only" product.

Niet te gebruiken zonder advies onder de leeftijd van 16 jaar. De koelstick is vervaardigd uit hoogwaardige, duurzame kunststoffen, het gebruikte koelmiddel is geheel ongevaarlijk. Het voldoet aan alle medische veiligheidseisen en is 9 maanden dagelijks te gebruiken. Ook onze bijgeleverde handige kokerverpakking is volledig geschikt voor langdurig verblijf in het vriesvak.

De Hemorcool® is na klinisch wetenschappelijk onderzoek, een bewezen, werkend hulpmiddel.

Onze publicatie vindt u in:

International Journal of Advances in Medicine (IJAM).

Zie: *Sustained transanorectal cryogenic treatment of hemorrhoids with the Cryocure/Hemorcool® device: a prospective study.*

De Hemorcool® is in meerdere landen verkrijgbaar, waaronder: Europa, Azië, VAE, UK, Hongarije en binnenkort ook in de USA. In Azië uitgebracht onder de naam CryoCure.



Biedt snel hulp
bij het bloeden



Veilig tijdens
de zwangerschap



Verlichting bij
pijn en jeuk



Geen pijnlijke
operatie



Blijf er niet
onnodig lang
mee lopen

Uitbreiding productenrange

Binnenkort zullen wij onze productenrange uitbreiden, met o.a. koperhoudende zalf en spray. Koper toepasbaar ook als spray zal worden ingezet in de strijd tegen virussen. Innovatie is en blijft ook van groot belang in deze "onzichtbare" strijd.

Geschiedenis koper.

Al in de oudheid was het bekend dat koper gezondheid bevorderende eigenschappen heeft. In het Egypte van 2000 jaar voor Christus werd koper gebruikt om water te steriliseren en wonden te behandelen. In de boeken van Hippocrates, Griekse arts, 460-380 jaar voor Christus, wordt koper geadviseerd voor de behandeling van wonden van de benen bij de aanwezigheid van spataders. Om te voorkomen dat er een infectie optrad werd koper poeder op de wond gestrooid. De werking van koper op de huid berust op het vernietigen van schimmels, bacteriën en virussen. Het zorgt er tevens voor dat de infectieziekten van de huid niet optreden. Het gebruik van koper op de huid leidt zelden tot overgevoeligheid.

Koper behoefte van de mens.

De geadviseerde dagelijkse behoefte aan koper is 3 mg. Het komt voor in groenten, bonen, avocado, pruimen en vele soorten vis.

Een tekort aan koper kan leiden tot:

1. Bloedarmoede
2. Osteoporose, botontkalking;
3. Laag aantal witte bloedlichaampjes
4. Onregelmatige hartslag
5. Verhoogde kans op een infectie
6. Varices, spataders




Wat zijn aambeien?

Ongeveer 2-4 cm. boven de anusopening bevindt zich een aantal zwellingen, die tezamen met de kringspi-er winden en ontlasting tegenhouden. Als men een wind moet laten en aandrang voelt om te ontlasten, krimpen de zwellichamen en gaat de sluitspier open, zodat een wind of de ontlasting naar buiten kan. Zonder deze zwellichamen zou een mens zijn winden en dunne ontlasting niet op kunnen houden. Dit fijne werk kunnen de sluitspi-eren niet alleen doen. Daar zijn de zwellichamen voor nodig. Als de zwellicha-men veel groter worden dan nodig is en deze door hard drukken bij het ontlasten ook nog eens naar beneden worden geperst en soms zelfs uit de anus hangen en bloeden, spreekt men van aambeien. Kort samengevat zijn aambeien veel te groot geworden zwellichamen. Waardoor zwellichamen ontaarden in aambeien, is niet bekend. Als oorzaken worden o.a. genoemd: bindweefselzwakte, alcohol, overge-wicht, hoesten, overdreven laxeermiddel gebruik.

Welke klachten kunnen aambeien geven?

De meest gehoorde klacht is bloedverlies. De patiënt verliest helderrood bloed bij of ná de stoelgang. Een andere klacht is jeuk. Jeuk ontstaat doordat de aam-beien vol bloed worden geperst. Een derde klacht is dat de patiënt het gevoel heeft dat er iets in de endeldarm zit dat aanvoelt als een zwelling of ont-lasting die er niet uit wil. Dat gevoel ontstaat, door-dat er grote aambeien zijn, die bovendien vol met bloed zijn gestuwd. Deze aambeien geven het gevoel van te moeten ontlasten en het toch niet te kun-nen. Door grote aambeien kan de ontlasting soms ook moeilijk uit de endeldarm komen. Persen bij de ontlasting heeft in dergelijke gevallen dan ook geen enkel resultaat. Als men het toch doet, komen op de lange duur de aambeien buiten de anus te hangen.

Omdat de oorzaak van anale klachten meestal bin-nen in de endeldarm ligt, waar ook aambeien zich bevinden, is het logisch dat men naar een middel heeft gezocht dat kou op de juiste plaats - dus 2-4 cm diep - kan inbrengen. Dat kan nu met behulp van de Hemorcool®. Door de inwerking van de kou krimpen de bloedvaten van de aambei in de endel-darm, waardoor een bestaande ontsteking afkoelt en minder pijnlijk wordt. Hierdoor zal het bloeden ophouden of sterk verminderen. Evenals jeuk en af-scheiding.

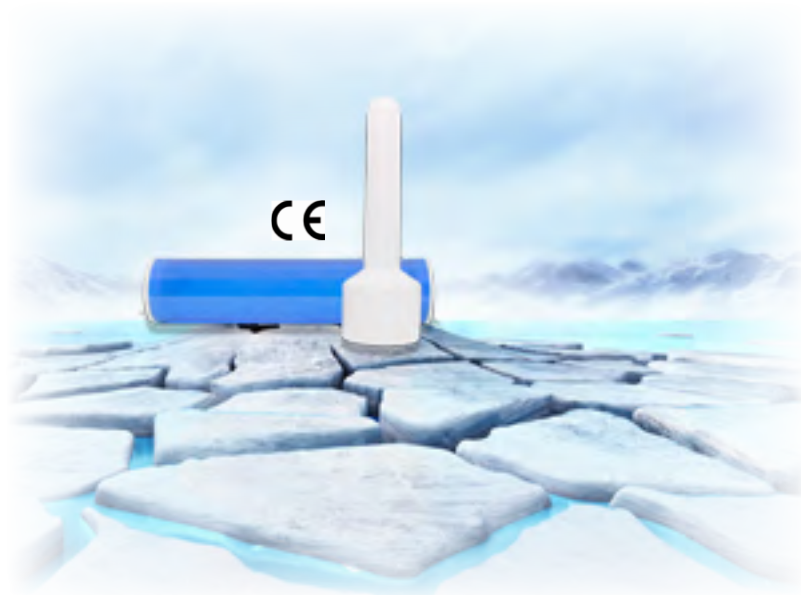

De Hemorcool®

De behandeling van aambeiklachten

De Hemorcool® is een koelstick, ter behandeling van aambeiklachten. Deze Hemorcool® is gevuld met een uitgekiend koelmiddel. Het is zo geconstrueerd, dat het gemakkelijk in de anus is in te brengen. Het kan niet in zijn geheel in de darm komen, omdat het dikke einde dat verhindert. De Hemorcool® is gemaakt van onbreekbaar kunststof. Let wel: de Hemorcool® niet beschadigen, door deze bijvoor-beeld te laten vallen. De lasnaad mag niet worden geopend, want daardoor wordt de Hemorcool® on-buikbaar. De Hemorcool® is nieuw in Nederland en België. In Amerika, Canada, Frankrijk en Duitsland wordt hij al vanaf 1973 toegepast. Met veel succes, zoals blijkt uit de wetenschappelijke berichtgeving van onderzoekers. Ze vermelden meer dan 90% goede resultaten te hebben gehad met deze anale koelstick.

Hoe werkt de Hemorcool®?

In de geneeskunde wordt pijn vaak bestreden door kou.

Bekende voorbeelden hiervan zijn:

- het leggen van een “koud” washandje op het voorhoofd tegen hoofdpijn
- het inpakken van een verstuikte enkel met ijs-blokjes
- het leggen van ijsblokjes op een insectenbeet of steek
- een zakje ijsblokjes op bijvoorbeeld een anus-trombose.




STOPT HET BLOEDEN



REDUCEERT OF STOPT DE ANUS JEUK



BIEDT DIRECT VERLICHTING BIJ PIJN

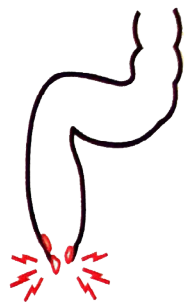

VERZACHTING BIJ INFECTIE


Gebruik Hemorcool®

Wanneer gebruikt u de Hemorcool®

Bij klachten kunt u de Hemorcool® gebruiken. Indien gewenst kan de Hemorcool® meerdere malen per dag gebruikt worden. Bij ernstige klachten geeft de Hemorcool® na herhaald gebruik langdurig verlichting en kunnen de klachten helemaal verdwijnen. Het instructiefilmpje kunt u vinden op ons YouTube kanaal, kijk op: **Pita Medical - Hemorcool®**

In welke gevallen gebruikt u de Hemorcool®?

- U kunt de Hemorcool® gebruiken om:
- het bloeden van aambeien snel te laten stoppen
 - de anusjeuk af te laten nemen of te laten ophouden
 - de anuspijn te bestrijden
 - de ontsteking te laten verminderen

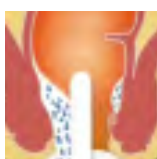

1. Hemorcool® is een medisch hulpmiddel gebaseerd op Cryotherapie.
2. Kan gewoon tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
3. Veiligheid, goedkope en effectieve behandeling van aambeien
4. Hemorcool® voldoet als medisch hulpmiddel aan de Richtlijn
5. 93/42/EEG van de Europese Commissie.

Instructie filmpje van de Hemorcool® op Youtube.



Voordelen van de Hemorcool®

De Hemorcool® werkt volgens het koelprincipe. Er komen dus geen medicijnen in de darm. Veel patiënten reageren nauwelijks op aambeizalven en zepillen. De Hemorcool® kan gewoon worden gebruikt tijdens de zwangerschap. De Hemorcool® is een puur Hollands product


Voor verdere instructies over het gebruik zie de gebruiksaanwijzing.



2 uur	Meerdere keren per dag te gebruiken	Advies: Te vervangen na 9 maanden 1e gebruik	Persoonlijk gebruik	Veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap
--------------	--	---	----------------------------	--

Gebruiksaanwijzing

1. Leg de Hemorcool® minstens 2 uur in het vriesvak van de koelkast.
2. Haal de Hemorcool® uit het vriesvak, breng wat vaseline aan op de Hemorcool® en rond de anus.
3. Ga op de zij liggen en breng de Hemorcool® meteen anaal in tot aan de verbreding.
4. Blijf ongeveer 10 minuten op de zij liggen.
5. Haal de Hemorcool® uit de anus en reinig deze met water en zeep.
6. Plaats de Hemorcool® in de opbergbox en leg deze voor minstens 2 uur in het vriesvak van de koelkast.

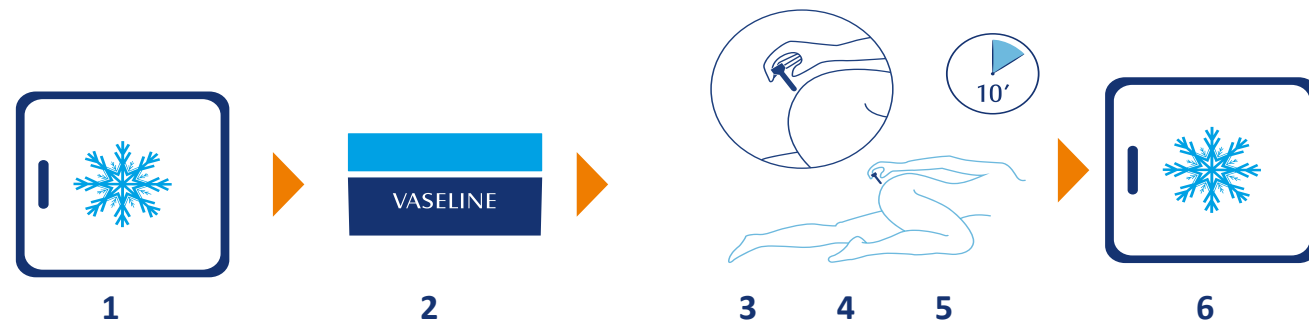

Veelgestelde vragen

“Kan de Hemorcool® kwaad”

Nee, van de Hemorcool® zijn geen negatieve bijwerkingen of complicaties bekend. Wel moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden.

“Kan de Hemorcool® kapot”

Nee, bij normaal gebruik kan deze niet kapot. Indien de Hemorcool® toch kapot gaat, doordat er bijvoorbeeld op gestaan is, dan dient u geen gebruik meer te maken van de stick, de Hemorcool® bevat geen gevaarlijke stoffen en is vervaardigd uit hoogwaardige kunststof materialen.

“Hoe lang blijft de Hemorcool® koud”

De Hemorcool® blijft ca. 10 - 12 minuten koud nadat u het uit de vriezer heeft gehaald, deze is dan ook gelijk klaar om te gebruiken. In de verpakking bijgeleverd vindt u vaseline, doe hiervan wat op de Hemorcool® en rondom de anus, zodat de Hemorcool® makkelijk naar binnen glijdt. Probeer u zich zoveel mogelijk te ontspannen tijdens het naar binnenbrengen van de Hemorcool®. Het inbrengen van de Hemorcool® doet geen pijn.

“Hoe vaak kan ik de Hemorcool® gebruiken”

De Hemorcool® kan meerdere malen per dag worden gebruikt. Bij klachten raden wij dit zelfs aan. Bij klachten is het raadzaam uw arts of een proctoloog te raadplegen. De Hemorcool® alleen gebruiken bij aambeiklachten.

Schoonmaken van de Hemorcool®

Na gebruik dient u de Hemorcool® alleen met water en zeep af te spoelen. U kunt de stick daarna terugstoppen in de meegeleverde, daarvoor bestemde, koker en direct in het vriesvak of diepvries leggen. Na 2 uur is de stick dan weer klaar voor gebruik. Wij ontraden het steriliseren of uitkoken van de Hemorcool®, deze kan hierdoor kapot gaan.

“Heeft de Hemorcool® een houdbaarheidsdatum”

Wij adviseren de Hemorcool® niet langer dan 9 maanden na aanschaf te gebruiken.

“Is de Hemorcool® veilig tijdens de zwangerschap”

Jazeker, de Hemorcool® is volledig veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap en bevat geen enkele chemische stof. Geen bijwerkingen voor moeder en ongeboren baby.

NOTE :

De **Hemorcool®** mag niet worden gebruikt wanneer deze beschadigd is. Alleen voor uitwendig en persoonlijk gebruik. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en volg de instructies hiervan*. Gebruik de **Hemorcool®** alleen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. De **Hemorcool®** bevat geen schadelijke stoffen en is recyclebaar. Wij adviseren de **Hemorcool®** 9 maanden na ingebruikname te vervangen.

Alleen dunne zijde stick inbrengen, verbreding onderkant **Hemorcool® blijft buiten de anus.*

LATEX VRIJ
NIET STERIEL



Gemaakt in NL

Pita Medical B.V.
Zijlandstraat 16
7271 DP Borculo
T + 31 (0) 6 27 25 44 97
www.hemorcool.com





VEILIG TIJDENS DE
ZWANGERSCHAP

VERZACHTING
BIJ INFECTIE

STOPT HET
BLOEDEN

REDUCEERT OF STOPT
DE ANUS JEUK

BIEDT DIRECT
VERLICHTING BIJ PIJN

Blijf niet onnodig met klachten lopen!

De Hemorcool® is zonder recept verkrijgbaar bij:

* Apotheek

* Drogist

ONLINE:

* Online drogist.nl

* Bol.com

* Amazon.nl

Discreet verstuurd.



Pita Medical B.V.
Zijlandstraat 16
7271 DP Borculo
KvK nr.: 649 05578

Betalings- en leveringsvoorwaarden

info@pitamedical.com
T + 31 (0) 6 27 25 44 97
www.hemorcool.com

