

Produktinformatie

De vaginawand is heel zacht en elastisch als gevolg van een verfijnde vochtbalans.

In een bepaalde levensfase van de vrouw, bijvoorbeeld na een bevalling, tijdens borstvoeding of tijdens de menopauze, dan wel bij gebruik van bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld de pil) of bij stress, wordt deze verfijnde vochtbalans verstoord. Daardoor ontstaat vaginale droogheid, vaak in combinatie met een branderig gevoel en jeuk. Voort kan de vaginawand beschadigd raken, als gevolg van wrijving tussen delen van de vaginawand, die onvoldoende vochtig zijn.

Naast behandeling van genoemde symptomen, zou het raadzaam zijn een middel toe te passen waarmee de vochtigheid en elasticiteit van de vagina wand wordt hersteld.

HYALOfemme® is een heldere kleurloze gel, met een sterk vocht herstellende werking, die wordt veroorzaakt door de werkzame stof HYDEAL®-D, dat veel lijkt op hyaluronzuur.

Hyaluronzuur is een natuurlijke stof, welke in de meeste menselijke weefsels is terug te vinden. Aldaar is deze stof verantwoordelijk voor de vochtbalans en waar nodig voor het herstel van kleine beschadigingen.

HYDEAL®-D herstelt het effect van het natuurlijke hyaluronzuur en doet dat zonder verdere neveneffecten.

HYALOfemme® hecht zich perfect aan de vaginawand en zorgt voor een langdurig herstel van de vochtigheid. Tevens wordt het herstel van kleine beschadigingen van de vaginawand als gevolg van vaginale droogheid, bevorderd.

Indicaties

Vaginale droogheid, ongeacht de oorzaak van deze droogheid. Ondersteuning van het herstel van beschadigingen van de vaginawand, als gevolg van vaginale droogheid.

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de dispenser op de top van de tube.
2. Knijp in de tube totdat de dispenser voor de helft is gevuld.
3. Reinig de vagina zoals u gewend bent.
4. Neem de dispenser van de tube, neem een gehurkte houding aan en plaats de dispenser diep in de vagina.
5. Leeg de dispenser volledig in de vagina.
6. Na gebruik de dispenser met veel water reinigen. Verder het resterend vocht uit de dispenser door de zuiger enige keren heen en weer te bewegen.
7. Bewaar de dispenser in de doos voor een volgend gebruik.
8. Indien sprake is van ernstige vaginale droogheid, is het raadzaam ook aan de buitenzijde van de dispenser wat HYALOfemme® gel aan te brengen.

Hoe vaak gebruiken?

Het wordt aanbevolen om HYALOfemme® eens per drie dagen in te brengen. Bij ernstige vaginale droogheid, is een dagelijkse toepassing mogelijk. Raadpleeg zo nodig uw arts.

Contra-indicaties

Het wordt afgeraden om HYALOfemme® te gebruiken, indien u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van het product.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

Ingeval van vaginale infecties, dient u eerst uw arts te raadplegen alvorens de gel te gebruiken.

De gel kan ook tijdens de menstruatie toegepast worden.

Als de verpakking beschadigd is, wordt geadviseerd de gel niet te gebruiken.

De gel buiten bereik van kinderen houden.

Bewaar de gel op een droge en koele plaats (bij voorkeur bij minder dan 40° C).

De uiterste gebruiksdatum van de gel, staat duidelijk aangegeven op de verpakking. Gebruik de gel niet, als deze datum gepasseerd is.

HYDEAL®-D en HYALOfemme® zijn geregistreerde handelsmerken van Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. licentie aan Fidia Farmaceutici S.p.A.

Producent

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 ABANO TERME (PD) - Italië



Hyalofemme®

Informazioni sul prodotto

L'epitelio vaginale è morbido ed elastico grazie ad un delicato equilibrio che mantiene il giusto livello di idratazione e lubrificazione.

In alcune fasi della vita (dopo il parto, durante l'allattamento, in menopausa), a seguito di certe terapie farmacologiche (contraccettivi orali), od in periodi di particolare stress questo delicato equilibrio viene alterato, inducendo uno stato di sofferenza, caratterizzato da secchezza vaginale, bruciore ed irritazione.

Il bruciore e l'irritazione, spesso associati a microlesioni dell'epitelio, sono causati dall'attrito provocato dalla mancata lubrificazione.

In questi casi, accanto ad un eventuale trattamento farmacologico specifico, è consigliabile l'utilizzo locale di un prodotto in grado di favorire l'idratazione della mucosa contribuendo a restituire la naturale elasticità e morbidezza.

HYALOfemme® è un gel incolore con elevate proprietà idratanti che contiene HYDEAL®-D, un derivato dell'acido ialuronico. L'acido ialuronico è la molecola naturale responsabile del mantenimento del corretto livello di idratazione dei tessuti, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito dei processi di riparazione.

HYDEAL®-D mantiene le caratteristiche di biocompatibilità e biointerattività dell'acido ialuronico, tipiche di una molecola che è già presente nei tessuti: ciò è garanzia di totale assenza di effetti collaterali.

La formulazione a base di HYDEAL®-D garantisce una perfetta adesione alla mucosa vaginale, una prolungata azione idratante e favorisce i naturali processi di guarigione delle microlesioni causate

dall'attrito.

Indicazioni

Gel complementare al trattamento della secchezza vaginale di varia natura; coadiuvante del naturale processo di guarigione delle microlesioni da attrito della mucosa vaginale.

Modalità d'uso

1. Avvitare l'erogatore vaginale all'imboccatura del tubo.
2. Spremere il tubo fino a riempire l'erogatore per circa metà della sua lunghezza.
3. Svitare l'erogatore dal tubo e, dopo aver provveduto ad un'adeguata igiene intima, inserire l'erogatore nella cavità vaginale, stando in posizione seduta o distesa sulla schiena.
4. Spingere lo stantuffo dell'erogatore fino a provocare la fuoriuscita di tutto il gel.
5. L'erogatore dopo l'uso deve essere pulito. Si consiglia di sciacquarlo con abbondante acqua, disinfettarlo e sciacquarlo nuovamente con acqua. Infine, eliminare l'acqua intrappolata nell'erogatore.
6. Conservare l'erogatore all'interno dell'astuccio fino al successivo utilizzo.
7. In caso di secchezza molto pronunciata è opportuno far fuoriuscire una piccola quantità di gel dall'erogatore e lubrificare quest'ultimo prima della sua introduzione.

Frequenza di applicazione

La frequenza di applicazione dipende dalle condizioni di secchezza della mucosa vaginale. Si raccomanda una applicazione ogni tre giorni per un periodo di trenta giorni, salvo diverso parere del Medico.

Controindicazioni

Ipersensibilità individuale accertata al prodotto.

Precauzioni ed avvertenze

In caso di infezione vaginale l'uso del prodotto è a discrezione del Medico.

Il prodotto può essere utilizzato anche durante il flusso mestruale e non influenza eventuali indagini ginecologiche.

In caso di confezione danneggiata, non utilizzare il prodotto e informare Fidia Farmaceutici.

Non disperdere i contenitori vuoti nell'ambiente.

Tenere fuori della portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto (T<40°C).

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

HYDEAL®-D e HYALOfemme® sono marchi registrati di Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. licenziati a Fidia Farmaceutici S.p.A.

Prodotto da:

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (PD) - ITALY

